

EZ-OX Plus^{MC}

Systeme d'oxygène portable



Laissez EZ-OX Plus^{MC} devenir votre partenaire et vous pourrez vous consacrer à vos patients plus efficacement.

VitalAire est le pionnier de l'innovation dans les gaz médicaux au Canada

- Une gamme complète de gaz médicaux et thérapeutiques
- Des usines de remplissage dédiées aux gaz médicaux

Vous avez besoin d'oxygène portable – RAPIDEMENT!

QUAND LA MOINDRE SECONDE EST PRÉCIEUSE, VOUS VOULEZ:

- Un oxygène facile à brancher
- Une réserve d'oxygène fiable pour emmener vos patients jusqu'aux urgences
- Pouvoir garder vos patients sous oxygène n'importe où - même quand il n'y a pas d'oxygène en réseau dans la pièce

VITALAIRE SANTÉ A LA SOLUTION POUR VOUS

EZ-OX Plus^{MC} est la solution innovatrice: régulateur de pression, débitmètre et bouteille (taille 5) ne font désormais plus qu'UN.

Avec EZ-OX Plus^{MC}: éliminez le besoin de régulateurs dans de nombreuses situations cliniques!

Pré-assemblé et prêt à l'emploi, **EZ-OX Plus^{MC}** est facile à utiliser. Une courte formation suffit et vous aussi, vous pourrez utiliser **EZ-OX Plus^{MC}**!

VITALAIRE À L'HÔPITAL

Pour: l'accessibilité | la communication | le service



EZ-OX Plus^{MC}

Systeme d'oxygène portable

MODE D'EMPLOI POUR EZ-OX PLUS^{MC}

- Vérifier la réserve d'oxygène affichée sur la jauge de pression
- Relier le tube d'oxygène sur la prise de sortie
- Choisir le débit en tournant la manette de contrôle
- Relier la tubulure au patient Lorsque le patient est de retour dans sa chambre: transférez le patient sur le réseau d'oxygène local (prise murale) et tourner la manette d'EZ-OX Plus^{MC} sur « 0 » (zéro)



TABLE D'ESTIMATION DU TEMPS D'OXYGÈNE RESTANT DANS LA BOUTEILLE (BOUTEILLE TAILLE 5)

Affichage sur le cadran de pression	Full	3/4	1/2	1/4
Débit – L/min				
0.5	23h	17h15	11h30	5h45
1	11h30	8h37	5h45	2h52
1.5	7h40	5h45	3h50	1h55
2	5h45	4h19	2h52	1h26
3	3h50	2h52	1h55	57 min
4	2h52	2h09	1h26	43 min
6	1h55	1h26	57 min	29 min
8	1h26	1h05	43 min	22 min
10	1h09	52 min	34 min	17 min
15	46 min	34 min	23 min	11 min
25	28 min	21 min	14 min	7 min

ATTENTION

NE JAMAIS RELIER UN BRANCHEMENT D'OXYGÈNE AU PORT AUXILIAIRE



VUE DE FACE

- Poignée de transport
- Manette de réglage de débit
- Prise de sortie pour tuyau d'oxygène
- Cadran de pression



VUE ARRIÈRE

- Port de remplissage du cylindre NE PAS enlever le capuchon Remplissage effectué par VitalAire/Air Liquide



Il est fortement conseillé de changer la bouteille quand la jauge de pression affiche des valeurs inférieures à 500 PSI (partie en rouge).

Il est fortement déconseillé de transporter un patient avec une bouteille affichant une pression inférieure à 500 PSI (1/4). Dans ce cas une seconde bouteille pleine doit accompagner le transport.

Les durées affichées ci-dessus ne sont que des estimations : la durée réelle peut varier.

Contactez VitalAire au 1 888 629 0202